

AKTIV[®] feminum[®]

NAWILŻAJĄCY ŻEL INTYMNY
z solą sodową kwasu hialuronowego

Działanie:

Feminum[®] AKTIV łagodzi skutki suchości pochwy poprzez:

- działanie poślizgowe, nawilżające – ogranicza możliwość wystąpienia otarć narządów płciowych,
- działanie środowiskowe – łagodzi otarcia, przywraca kwaśny odczyn pH pochwy (3,8-4,2) i powstrzymuje rozwój mikroorganizmów odpowiedzialnych za jej zakażenie.

Żel zawiera hialuronian sodu (sól sodową kwasu hialuronowego), który wspomaga regenerację błony śluzowej w pochwie.

Przeznaczenie wyrobu:

Feminum[®] AKTIV żel przeznaczony jest do nawilżania i ochrony nadwrażliwej śluzówki pochwy przed agresywnymi czynnikami środowiska.

Żel Feminum[®] AKTIV wskazany jest do stosowania przy wszelkiego rodzaju suchości pochwy, np. wywołanej niedoborem estrogenów, wiekiem lub stresem.

Wyrób ten może być stosowany regularnie, odpowiednio do potrzeb i bez ograniczeń wieku, w tym również przez kobiety w ciąży, jak i matki karmiące piersią.

Feminum[®] AKTIV w bezpieczny sposób zastępuje osobiste nawilżenie, ułatwiając kontakty intymne. Żel można stosować przy użyciu prezerwatyw (w przeciwieństwie do innych preparatów opartych na bazie oleju).

Feminum[®] AKTIV ułatwia również aplikowanie tamponów, przeprowadzanie badań USG oraz pomiar temperatury.

Feminum[®] AKTIV żel jest preparatem zupełnie neutralnym, nie pozostawiającym plam na bieliźnie.

Sposób użycia:

- Należy umyć ręce przed i po zastosowaniu wyrobu.
- Niewielką ilość żelu należy nałożyć na miejsca narażone na otarcia – także przed kontaktem intymnym lub badaniem. W razie potrzeby można użyć większej ilości żelu. Po użyciu zamknij szczelnie tubę.
- Feminum[®] AKTIV może być naniesiony bezpośrednio na prezerwatywę lub skórę.
- Zastosowanie dopochwowe ułatwia dołączony **aplikator**.
W tym celu należy przykręcić aplikator do tuby, zdjąć nasadkę ochronną i wycisnąć żel do wypełnienia aplikatora. Następnie włożyć aplikator do pochwy, ponownie nacisnąć tubę tak, aby żel przedostał się do kanału pochwy. Po użyciu aplikator należy oczyścić (najlepiej poprzez wyciśnięcie niewielkiej ilości żelu przez otwór i wytarcie go miękkim papierem) i nałożyć nasadkę ochronną.

Środki ostrożności:

- Preparatu nie należy stosować w przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- W przypadku zastosowania żelu na uszkodzoną skórę lub błony śluzowe mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, takie jak pieczenie, podrażnienie. Działania te zazwyczaj ustępują samoistnie po wygojeniu rany.
W razie utrzymywania się tego rodzaju dolegliwości może zaistnieć konieczność odstawienia wyrobu i konsultacji z lekarzem.
- Unikać kontaktu z oczami ze względu na możliwość podrażnienia.
- Preparatu nie należy stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
- Niewykorzystany lub przeterminowany wyrób należy wyrzucić do specjalnego pojemnika na odpady medyczne znajdującego się w aptece.



Uwaga:


- Żel nie jest środkiem antykoncepcyjnym.
- Zaleca się ograniczyć stosowanie preparatu podczas podejmowania prób poczęcia.
- Ze względów higienicznych zaleca się stosowanie jednego opakowania wyrobu przez jedną osobę.

Składniki wyrobu:

gliceryna, hydroksyetyloceluloza, hialuronian sodu (sól sodowa kwasu hialuronowego), kwas mlekowy, octan chloroheksydyny, woda oczyszczona.

Warunki przechowywania:

Preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętej tubie, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

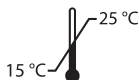

Dostępne opakowania:

- tuba z aplikatorem zawierająca 40 g żelu.

Pytania i uwagi dotyczące wyrobu prosimy kierować na adres:



masters[®] Sp. z o.o.

Wysogotowo ul. Skórzewska 30, 62-081 Przeźmierowo
tel. +48 61 872 15 17, www.masterspharm.pl

WYRÓB MEDYCZNY  1434

Data opracowania instrukcji: kwiecień 2023

Polecamy także inne wyroby medyczne z linii FEMINUM[®]

feminum[®]

NAWILŻAJĄCY ŻEL INTYMNY

(zawiera glicerynę, która nawilża
oraz kwas mlekowy, który wspomaga
utrzymanie prawidłowego pH pochwy)

FEMINUM[®] żel stosuje się:

- w przypadku suchości śluzówki pochwy;
- w zapobieganiu podrażnieniom i otarciom okolic intymnych;
- w zapobieganiu infekcjom intymnym, np. bakteryjnemu zapaleniu pochwy;
- pomocniczo podczas stosowania tamponów lub tabletek dopochwowych;
- pomocniczo podczas wykonywania badań ginekologicznych, ultrasonograficznych lub pomiaru temperatury.

feminum[®] fit

ŻEL DOPOCHWOWY DO REGULACJI PH

(zawiera kwas mlekowy oraz dodatkowo
fitoglikogen o działaniu nawilżającym
i powlekającym)

FEMINUM[®] fit jest wskazany do natychmiastowej regulacji pH pochwy i przywrócenia prawidłowego, kwaśnego odczynu, który uległ zaburzeniu z powodu:

- zakażenia pochwy o różnej przyczynie (bakteryjnej, grzybiczej lub pierwotniakowej),
- długotrwałego stosowania antybiotyków,
- długotrwałego stosowania środków antykoncepcyjnych,
- miesiączki,
- podczas menopauzy.

www.feminum.pl